

QUE SIGNIFIENT LES LUMIÈRES DU PERFECTDRY LUX?



Lumière bleue clignotante:
le déshumidificateur est actif



Lumière éteinte:
le cycle de séchage est terminé



Lumière bleue: mode veille. Survient brièvement une fois le couvercle fermé, puis la lumière s'éteint



WIDEX PERFECTDRY LUX

DÉSHUMIDIFICATEUR ÉLECTRONIQUE

WIDEX

SOUND LIKE NO OTHER

Le déshumidificateur électronique WIDEX PerfectDry Lux se veut la solution idéale pour prendre soin de vos appareils auditifs et de vos embouts.

PRATIQUE

Le déshumidificateur électronique PerfectDry Lux est de petite taille et portable, vous permettant de prendre facilement soin de vos appareils auditifs. PerfectDry Lux est compatible avec toutes les aides auditives Widex y compris WIDEX MOMENT™.

SÉCURITAIRE ET HYGIÉNIQUE

Le déshumidificateur électronique PerfectDry Lux utilise la lumière ultraviolette (UV), le rendant complètement hygiénique et éliminant tout risque d'infections d'oreilles. Les lumières UV s'éteignent automatiquement lorsque le couvercle est ouvert: l'appareil ne présente donc aucun risque pour votre vision.





PerfectDry Lux

NETTOYAGE ET SÉCHAGE SIMPLES ET AISÉS

Avec 4 sources de lumière UV, le déshumidificateur PerfectDry Lux utilise une approche 360° nettoyant et séchant les appareils auditifs en 45 minutes. Il suffit simplement de placer vos appareils auditifs avec portes-piles ouvertes dans le réceptacle, fermer le couvercle et appuyer le bouton de mise en marche. Une lumière bleue apparaîtra. Le déshumidificateur s'éteindra automatiquement une fois le cycle de séchage de 45 minutes complété.