

# 補聴器は、お手入れがとても大切です。

補聴器は特に湿気、汗などの水分や汚れが苦手です。

例えばこんな時

こまめに補聴器本体を乾いた布で拭きましょう。




- 汗をかいた時
- 水に濡れてしまった時
- 結露している時

## 注意

お風呂など湿気の多い場所で使用しないでください。サビなどが故障の原因になります。

故障を防ぐために毎日乾燥させることが重要です。

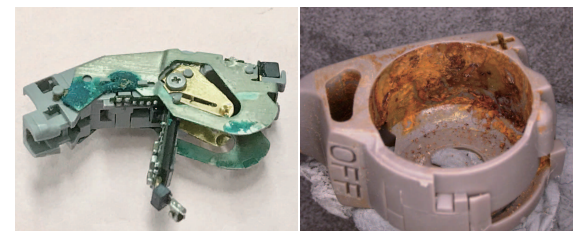

水分を放置したためにサビが発生してしまった例  
左:本体 右:バッテリードア

## お手入れの仕方



- 補聴器本体は付属のクロスや乾いた布で拭いてください。
- バッテリードア内部は綿棒などで拭いてください。



- 音の出口は付属の掃除用ブラシで、音の出口を下に向けてブラッシングしてください。



※器種により補聴器本体や耳せんの形状は異なります。

- 最後に乾燥ケースや電気乾燥器に入れて乾燥させます。



充電式補聴器の場合、いつ乾燥させるの？

そのお悩みを解決

## 充電式補聴器用 電気乾燥器

新登場

# 充電しながら 乾燥！

2時間で完了

# いつも 清潔！

細菌を99.9%除菌！\*

※すべての菌を除去できるわけではありません。

## NEW dry-cap uv 2<sup>®</sup>

[ドライキャップ ユーブイ2]

サイズ:120mm×120mm×120mm

本体重量:315g

電源:ACアダプタまたはUSB接続

保証:2年

価格:8,800円(税込)



(使用イメージ)

## かんたん操作！

- 1 補聴器を充電器にセットしたまま本体をかぶせる。
- 2 スイッチを1回押すだけ。ワンタッチの簡単操作。

様々なメーカーの充電式補聴器に対応

使い方動画



### 上手な使い方

夜お休み前にセット！→ 2時間で乾燥と除菌が完了。朝起きてすぐに補聴器を使えます。  
ちょっとした時間でも→ 2分で除菌。いつも清潔を保てます。