

Widex USB Link インストールマニュアル

2014年8月
ワイデックス株式会社
ワイデックススクール部

Windows 8.1 / Windows 8 対応版

注意： ソフトをインストールする前に Widex USB Link をパソコンに接続しないでください。

◎ Widex USB Link とは？

Widex USB Link は、ワイデックスのワイヤレス（無線）補聴器をフィッティングするためのプログラミングインターフェイスです。プログラミングケーブルやプログラミングシューは使用しません。

◎ Widex USB Link を使用するための必要なパソコンのスペック（動作環境）

Widex USB Link をお使いになるには下記のスペックが必要です。

オペレーティングシステム (OS)	Windows 8.1、Windows 8（32bit 版 / 64bit 版）、 Windows 7（Starter ^{※1} を除く、32bit 版 / 64bit 版）、Windows Vista （Home Basic、Home Premium、Business、Ultimate 各 32bit 版 ^{※2} 、 要サービスパック 2 ^{※3} 以上）
CPU	1GHz 以上（2GHz 以上を推奨）
システムメモリ	1GB 以上を推奨
USB ポート	USB Link 接続用に 1 つ


※1 ネットブックやネットトップと呼ばれる一部の小型パソコンに搭載されている Windows 7 Starter 版は、一部機能の制限などがあり、動作確認を行っていない為、サポート対象外となります。

※2 Windows Vista 64bit 版は動作確認を行っていないため、サポート対象外となります。

※3 Windows Vista は、サービスパック 2 以上が必要となります（サービスパック・・・OS の修正プログラム集）。サービスパック 2 がインストールされていないパソコンは、Microsoft Update で最新版のサービスパックをインストールしてください。なお、サービスパックのインストール手順やインストール後の不具合に関するお問い合わせにつきましては、お答えしかねますので、予めご了承ください。

◎ Widex USB Link 同梱物

- ・Widex USB Link 本体 1 個
- ・USB ケーブル（3m） 1 本
- ・耳あな型（ITE/CIC）用 補聴器固定器具 1 個
- ・取扱説明書 1 冊

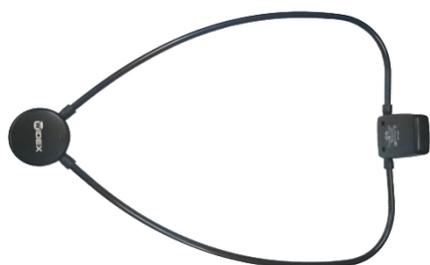

【Widex USB Link 本体】



【耳あな型（ITE/CIC）用
補聴器固定器具】



【USB ケーブル(3m)】

◎ Widex USB Link 使用上の注意

- ・Widex USB Link とパソコンの間は付属の USB ケーブルで接続してください。市販の USB ケーブルを使用される場合、最長でも 5m 以下に収まるよう接続してください。（※ USB の最大ケーブル長さが 5m と規定されている為、それ以上の長さの動作保証は致しかねます。）


～ 第 2 版 ～

1. Widex USB Link ソフトのインストールと設定

1-1  Compass V5.7 CD 2、または最新版の COMPASS GPS CD をパソコンの CD (または DVD) ドライブに挿入してください。

【自動再生画面が表示された場合】


「フォルダーを開いてファイルを表示」をクリックし、1-4 へお進みください。

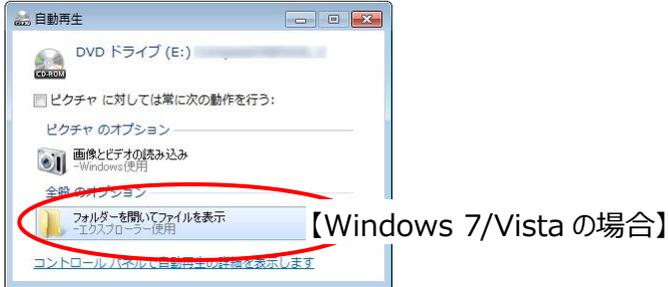


1-2 デスクトップ (またはスタートメニュー内) のコンピューターを開いてください。Windows 8.1/8 はタスクバーのフォルダーアイコン () を開いてください。




1-3 CD (または DVD) ドライブを右クリックし、「開く」をクリックしてください。

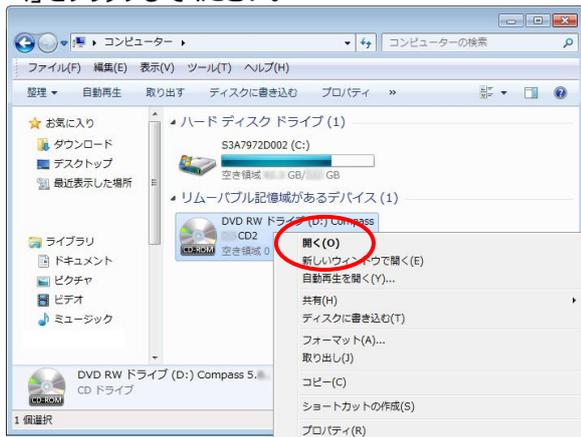

1-4 「Support」フォルダをダブルクリックしてください。

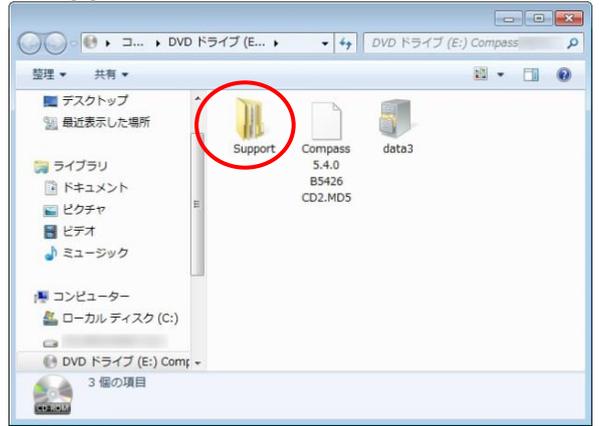

1-5 「Widex USB Link driver」フォルダをダブルクリックしてください。

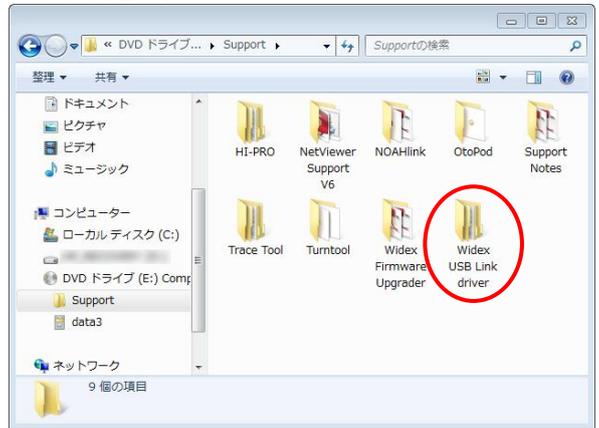

1-6 Windows 8 パソコンの場合は、「Ver1.9.4」または「Ver1.9.5」フォルダをダブルクリックしてください。


Windows 7、Vista パソコンの場合は、「Older versions」フォルダ内の「Ver.1.9.1」フォルダをダブルクリックしてください。

1-7  **Setup(.exe)** を右クリックし、 管理者として実行(A)をクリックしてください。



Windows 8/7/Vista パソコンをお使いの場合

「ユーザーアカウント制御」画面は「はい(Y)」ボタンまたは「許可(A)」ボタンをクリックしてください。

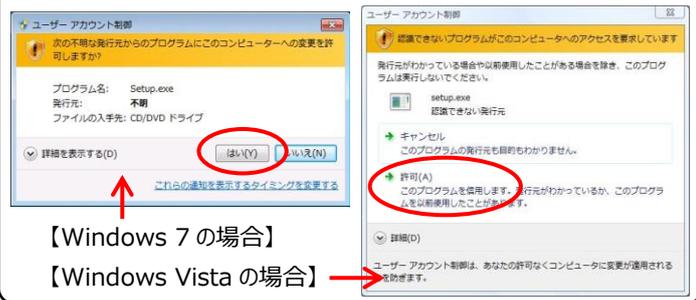

【Windows 7 の場合】


【Windows Vista の場合】

1-8 「次へ(N) >」ボタンをクリックしてください。



参考：Windows セキュリティ画面について

Windows 8 や 7、Vista ではインストール中に「Windows セキュリティ」画面が表示されることがあります。「このドライバーソフトウェアをインストールします(I)」をクリックしてください。

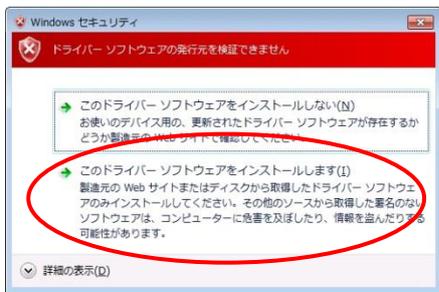

1-9 「✓ Widex A/S (WinUSB)…」となったことを確認し、「完了」ボタンをクリックしてください。

「✗」マークの場合は、「完了」ボタンをクリック後、OS と USB Link ソフトのバージョンを確認し、正しいバージョンをインストールしてください。




1-10 開いている画面をすべて閉じ、パソコンから CD を取り出してください。

1-11 Widex USB Link に付属の USB ケーブルを取り付けます。USB ケーブルの反対側をパソコン本体の USB ポートに挿し込みます。




1-12 自動的にドライバーが適用されます。作業に数分かかる場合がありますので、作業が終わるまでしばらくお待ちください。再起動などは行わないでください。

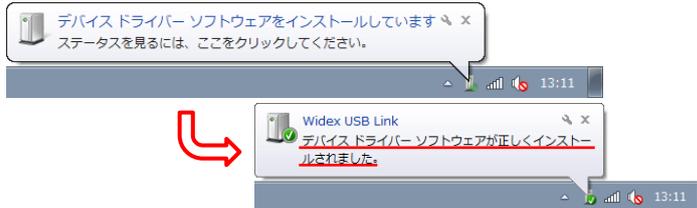

自動的にドライバーが適用されない場合は、パソコンから Widex USB Link を外し、パソコンを再起動してください。再起動後、Widex USB Link を取り付けてください。

1-13 「はい(Y)」、または「今すぐ再起動する(R)」ボタンをクリックしてください。

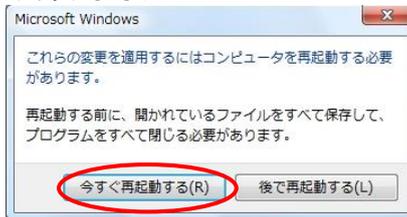

お使いのパソコンによっては、上記画面が表示されない場合があります。再起動後、1-14 へお進みください。



※ 正しくドライバーが適用されると、Widex USB Link の緑のランプが点滅します。

- 1-14 **Compass の場合：**
「セットアップ(S)」メニューから「インターフェイス(I)」
COMPASS GPS の場合：
「COMPASS 設定」→「インターフェイス」
タブをクリックしてください。 【Compass の場合】



- 1-15 「選択可能なインターフェイス」の中から「**USB Link (USB リンク)**」をダブルクリックしてください。




- 1-16 「**USB Link (USB リンク)**」の項目をクリックし、「**接続**」または「**テスト**」ボタンをクリックしてください。



- 1-17 USB Link への接続ができたことを確認し、「**OK(O)**」ボタンをクリックしてください。



- 1-18 **Compass の場合：**
「OK」ボタンをクリックしてください。
COMPASS GPS の場合：
「☆概要」をクリックしてください。

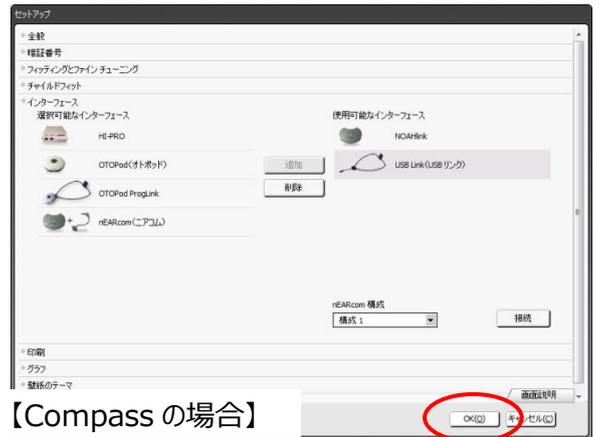


以上で、Widex USB Link ソフトのインストールと通信確認は完了です。

2. Widex USB Link の使い方(テーブル上で検索・両耳装用)

～ 新規フィッティングの場合 ～


ここでは、お客様に補聴器を装着していただく前に、USB Link との接続確認する方法をご紹介します。

なお、この設定方法は Compass の「Compass ヘルプ(H)」→「ビデオライブラリー(I)」から「BTE(または ITE/CIC), テーブル上で検出(USB)」を選択すると、動画でご覧いただけます。(※ 要 Adobe Flash Player®)

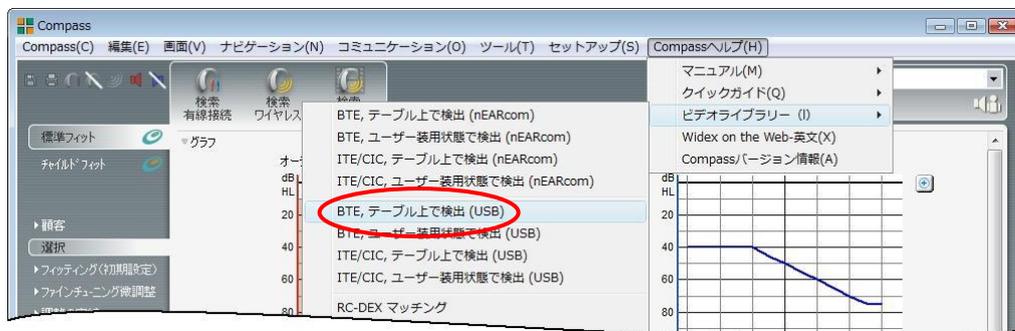


※ 以降、Compass を使って手順を記載しますが、COMPASS GPS でも同様の手順で調整いただけます。

2-1 補聴器に補聴器用空気電池を挿入してください。

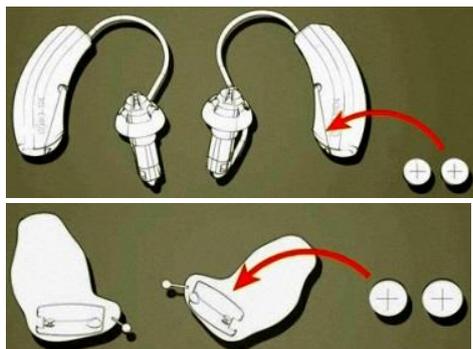

2-2 補聴器を Widex USB Link の中に左右正しく置きます。耳あな型補聴器は付属の台にフェイスプレートが上にくるように置きます。

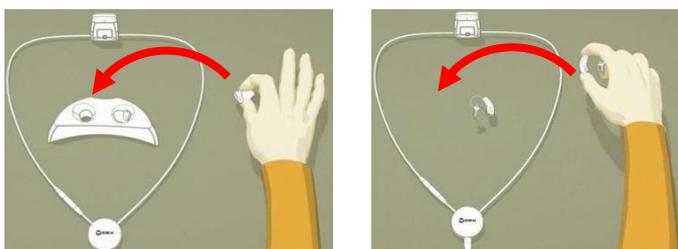

2-3 Compass の「検索 ワイヤレス」ボタンをクリックし、補聴器を検索します。




2-4 「♪」ボタンをクリックすると一方の補聴器から、数秒間確認音が呈示されます。一部の耳かけ型補聴器では、補聴器本体の LED が点灯します。



どちらの補聴器から音が出ているか確認してください。確認が終わったら、元の位置に戻します。

2-5 補聴器の左右を指定し、チェックしてください。下記例では右にチェックしています。

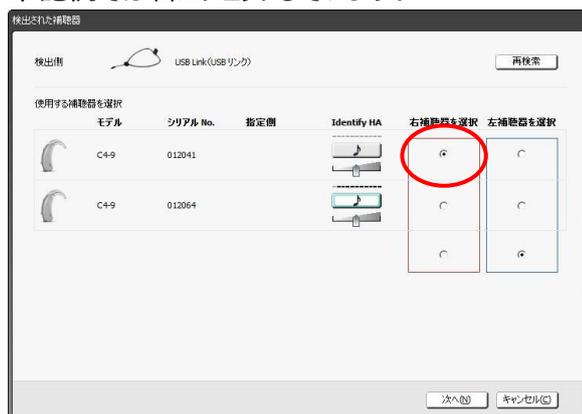


※この時点では、まだ左右は確定されていません。

2-6 もうひとつの「♪」ボタンをクリックし、反対側の補聴器についても確認を行ってください。




もう一方の補聴器から音が出ているか確認してください。確認が終わったら、元の位置に戻します。

2-7 左右の補聴器を選択にチェックをしてください。続いて、「次へ(N)>」ボタンをクリックしてください。下記例では、左にチェックしています。

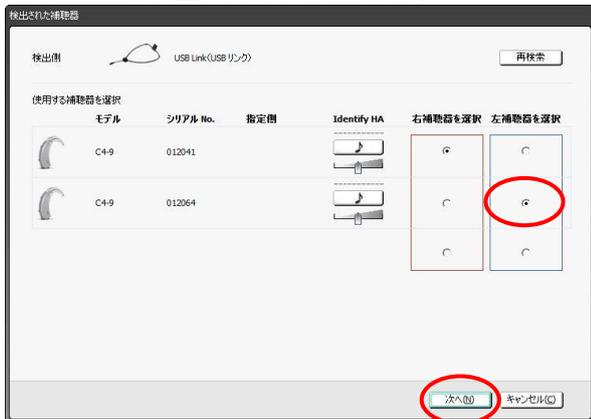

※この時点では、まだ左右は確定されていません。

2-8 パソコンと補聴器との間で通信を行います。画面が閉じるまでお待ちください。

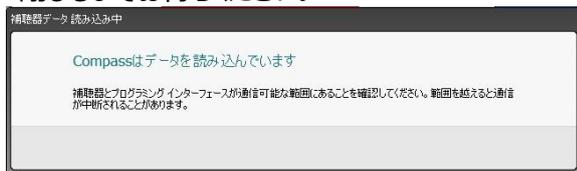


2-9 開始点の選択画面が表示されます。以上で補聴器とのワイヤレス（無線）初期設定は完了です。



※この画面の時に補聴器の左右が確定されます。

2-10 お客様に Widex USB Link を首からかけてもらいます。次に補聴器をお客様に装着してください。


※Widex USB Link の通信部分が補聴器の方向を向くように装着します。

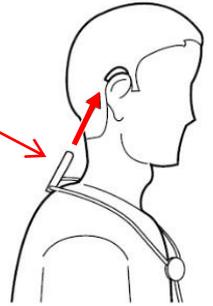

続いて、別紙「DREAM クイックガイド」等を参考に補聴器の調整を行ってください。

参考：左右を変更する場合

試聴器等で前回のフィッティングと装着耳が変わる場合、下記画面が表示されます。「Yes(Y)」をクリックしてください。なお、「Yes(Y)」をクリックすると補聴器内のデータはすべて初期化されます。

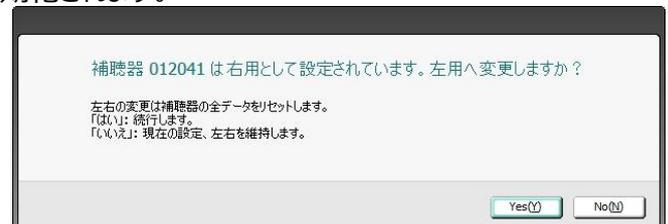


3. Widex USB Link の使い方(ユーザー装着状態での接続・両耳装着)

～ 再調整の場合 ～

ここでは、お客様に補聴器を装着していただいた後に、USB Link との通信確認する方法をご紹介します。


なお、この設定方法は「Widex USB Link の使い方 (テーブル上で検索・両耳装着)」と同様に動画でご確認いただけます。

(※ 要 Adobe Flash Player)。

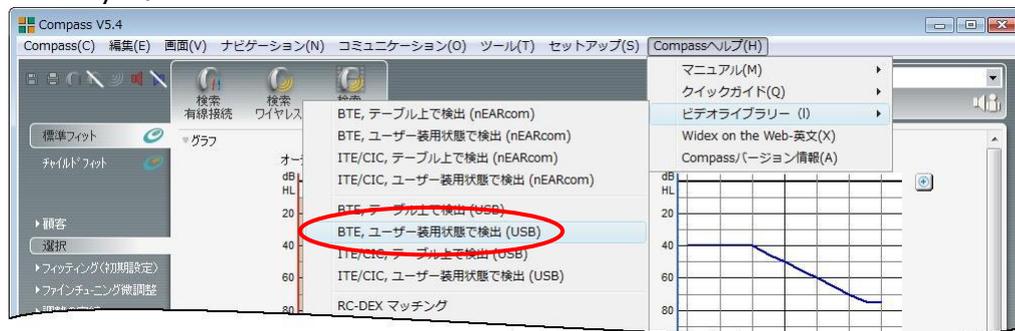

※ 以降、Compass を使って手順を記載しますが、COMPASS GPS でも同様の手順で調整いただけます。

3-1 補聴器に補聴器用空気電池を挿入してください。

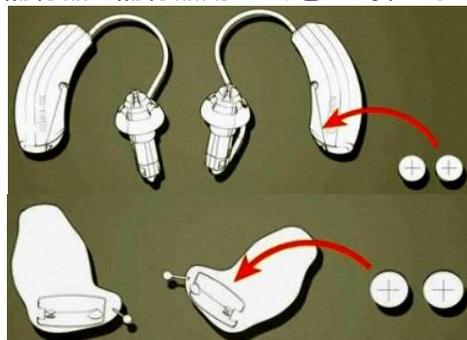


3-2 お客様には補聴器を装着したままで、Widex USB Link を首にかけてもらいます。



3-3 Compass を起動し、「検索 ワイヤレス」をクリックしてください。



3-4

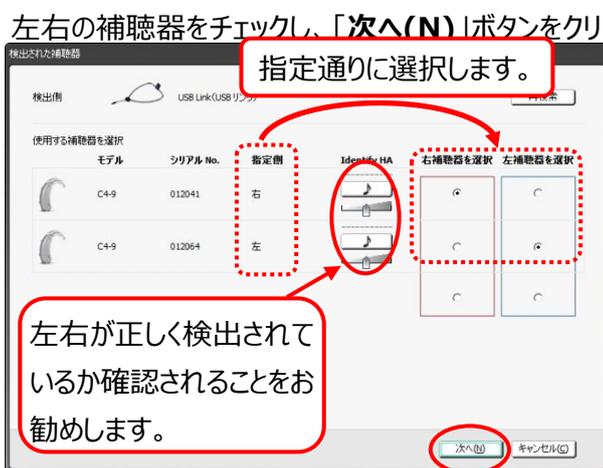

3-5

開始点の選択画面が表示されます。ファインチューニング (微調整) が選択されている状態で「OK(O)」ボタンをクリックしてください。



続いて、補聴器の再調整を行ってください。